

GD/ HS18F Intramuscular injection training pad แผ่นจำลองสำหรับฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

Intramuscular Injection Training Kit

ITEM NO. : GD/HS18F

Features:

1. The model is divided into three layers: skin, subcutis and muscle.
2. Wearable design makes it a convenient simulator for training.



วัสดุ: PVC คุณภาพดี

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

แผ่นจำลองสำหรับฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเสมือนจริง ออกแบบให้สามารถนำมาสวมใส่ได้ ซึ่งเหมาะกับการฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ triangular muscle โดยสามารถฉีดสารน้ำเข้าไปในแผ่นฝึกได้ โดยแผ่นจำลองนี้ได้รับการออกแบบให้สะดวกในการพกพา แผ่นจำลองนี้เป็นแผ่นจำลองที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

วิธีการใช้งาน

นำแผ่นจำลองมาสวมเข้ากับท่อนแขนด้านบน ประมาณ 2-3 นิ้วต่ำจากหัวไหล่ ใช้ syringe ขนาด 3 ซีซี และเข็มฉีดยาเบอร์ 22 ปักเข็มลงไปลึกประมาณ 2 ใน 3 ของหัวเข็มโดยปักลงไป ในแนวตั้งจากผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ เนื่องจากกล้ามเนื้อตำแหน่งนี้จะบางกว่าตำแหน่งกล้ามเนื้อสะโพกจึงฉีดสารน้ำเข้าไปจำนวนไม่มาก

บริษัท ภัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

53 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร. (66) 0-316-6036-9 แฟกซ์. (66) 0-316-8408



NATTAKIT HEALTH CARE CENTER CO.,LTD

บริษัท ภัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

53 Moo 13 Debaratna Road., Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : (66) 0-2316-6036-9 Fax : (66) 0-2316-8408

การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง

1. ทำความสะอาดด้วยสบู่และน้ำ ไม่ควรจุ่มหุ่นจำลองลงไปใต้น้ำยาล้างหรือน้ำ
2. ให้ใช้งานในพื้นที่ที่สะอาด หลีกเลี่ยงการใช้งานโดยใช้ปากกาเขียน marker ปากกาลูกลื่น อะซิโตน ไอโอดีน หรือผลิตภัณฑ์ที่เปื้อนอื่นๆ ไม่วางผลิตภัณฑ์บนกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษที่มีหมึกพิมพ์
3. เพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ควรทำความสะอาดหลังจากใช้งาน และควรตรวจสอบสภาพการใช้งานอยู่เป็นระยะๆ
4. เก็บรักษาในที่แห้ง ไม่มีแสงแดดส่อง

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีความผิดปกติมาจากโรงงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันซื้อสินค้า

บริษัท ภัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

53 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร. (66) 0-316-6036-9 แฟกซ์. (66) 0-316-8408